



Крісло донорське призначене для роботи в закритих приміщеннях. Рекомендовані кліматичні умови: температура з + 10 ° С до + 40 ° С, допустима зміна температури навколишнього середовища протягом 8 годин не більше ніж 20 ° С; відносна вологість повітря з 30 до 80%; атмосферний тиск з 700 до 1060 hPa.

Увага! Посадка і підйом донора з крісла здійснюється тільки при повороті підлокітника по осі на 90 градусів відносно площини сидіння крісла.

Монтаж крісла.

Виробник поставляє крісло споживачеві в зібраному стані

Безпека.

Конструкція крісла забезпечує безпечне використання за умов дотримання принципів, зазначених у цій інструкції.

Ремонт.

Ремонт здійснює тільки виробник. Щоб забезпечити безпечну і надійну роботу крісла, необхідно застосовувати тільки запчастини, що поставляються виробником.

Опис крісла.

Крісло донорське складається з міцного металевого каркаса, на якому розташовані м'які подушки. Виріб спеціально розроблено для забезпечення максимального комфорту донора і зручності в роботі медичного персоналу. Це досягається за допомогою наступних пристроїв:

- збірна конструкція підлокітників (Для полегшення роботи медичного персоналу при зміні положення підлокітників крісла і забезпечення стійкої посадки донора)
- контроль положення крісла (зміна положень крісла здійснюється за допомогою механічного регулювання з урахуванням потреб донорів)
- крісло висотою 600 мм (робоче положення крісла на рівні пояса для проведення флеботомії і просто для зручності медичного персоналу)
- підлокітники із змінним положенням (для комфорту підлокітника розсуваються, коли донор сідає, а також можуть переміщатися вгору і вниз для найбільш зручного положення рук)
- вінілова оббивка

Для оббивки крісла використовується м'який, довговічний і добре миється, представлений в широкій колірній гамі.

Технічні характеристики:

Максимальне навантаження, кг	180
Максимальне навантаження на дно підлокітника, кг	5
Габаритна довжина, мм	1700
Габаритна ширина, мм	900
Габаритна висота, мм	1250
Посадкова висота, мм	600

Миття та дезінфекція

Не можна дезінфікувати крісло в дезінфекційній камері.
Не застосовувати відбілювачів, їдких і корозійних засобів.

Комплект поставки

Крісло - 1шт
Паспорт - 1шт

Гарантійні зобов'язання.

Виробник гарантує високу якість продукції при дотриманні споживачем умов експлуатації.
Термін гарантії 12 місяців з моменту придбання

