

## Елементи охолодження (акумулятори холоду) українського виробництва

Акумулятор штучного холоду та тепла (АХ)- охолоджувальний пристрій, являє собою контейнер, заповнений речовиною з великою теплоємністю.

Жоден ТермоБокс, ТермоКонтейнер чи ТермоСумка не може використовуватися за призначенням без наявних в них акумуляторів холоду. Від АХ залежить час та відстань на яку треба буде транспортувати той чи інший медичний препарат чи компонент крові.



Акумулятори холоду серії «Medical Iserack» - це лінійка охолоджувальних елементів з різними розмірами, об'ємами та фазовими переходами холодоагенту. Підходять для всіх сфер використання медичного призначення. Висока якість виконання. Одні з самих доступних на ринку.

### Види та розміри акумуляторів холоду

Найменування	Об'єм (мл)	Розміри (мм)
Medical Iserack 400	400	165*90*30
Medical Iserack 1000	1000	250*150*35
Medical Iserack 1200	1200	385*200*20
Medical Iserack 1500	1500	325*245*30
Medical Iserack 2000	2000	310*285*30
Medical Iserack 2400	2400	438*225*30

	<b>Білі АХ з фазовим переходом +18 °С</b> Використовуються для підтримання температурного режиму +15...+25 °С в літньо-зимову пору року. Працює навіть при температурі навколишнього середовища -20°С. Підходить для транспортування ліків, які мають зберігатися при кімнатній температурі. Також використовуються в лабораторній сфері при транспортування бактеріальних зразків.
	<b>Зелені АХ з фазовим переходом +5°С</b> Використовуються для підтримання температурного режиму +2...+8 °С для продуктів, які занадто чутливі до переохолодження (наприклад, вакцини) в літньо-зимову пору року. Працює навіть при температурі навколишнього середовища -20°С. Також підходять для транспортування більшості ТЛП, еритроцитів та цільної крові.
	<b>Сині АХ з фазовим переходом 0°С</b> Використовуються для підтримання температурного режиму +2...+8 °С для більшості термолабільних препаратів, еритроцитів та цільної крові. Працює при температурі навколишнього середовища +2...+43 °С. Працюють тільки в літню пору року.
	<b>Жовті АХ з фазовим переходом -20 °С</b> Використовуються для підтримання температурного режиму -20...0 °С для деяких вакцин та інших термолабільних препаратів, що потребують зберігання в замороженому стані.
	<b>Червоні АХ з фазовим переходом -30 °С</b> Використовуються для підтримання температурного режиму -30...-20 °С для деяких вакцин та інших термолабільних препаратів, що потребують зберігання в замороженому стані.

Акумулятори холоду мають висновки СЕС. Гарантія 6 місяців з моменту постачання.



Україна, 01042, м. Київ, р-н  
Печерський, вул. Джона Маккейна, 40



+ 38-067-363-80-10  
+ 38-096-129-80-46



tov.redmed@gmail.com



www.red-med.prom.ua  
www.redmedUA.com