



Крісло донорське призначене для роботи в закритих приміщеннях. Рекомендовані кліматичні умови: температура від +10°C до +40°C, допустима зміна температури навколишнього середовища протягом 8 годин не більше ніж 20°C; відносна вологість повітря з 30 до 80%; атмосферний тиск з 700 до 1060 hPa.

Увага! Посадка і підйом донора з крісла здійснюється тільки при повороті підлокітника по осі на 90 градусів відносно площини сидіння крісла.

Монтаж крісла.

Виробник поставляє крісло споживачеві в зібраному стані.

Безпека.

Конструкція крісла забезпечує безпечне використання за умови дотримання принципів, зазначених у цій інструкції.

Ремонт.

Ремонт здійснює тільки виробник. Щоб забезпечити безпечну і надійну роботу крісла, необхідно застосовувати тільки запчастини, що поставляються виробником.

Опис крісла.

Крісло донорське складається з міцного металевого каркаса, на якому розташовані м'які подушки. Виріб спеціально розроблено для забезпечення максимального комфорту донора і зручності в роботі медичного персоналу. Це досягається за допомогою наступних пристроїв:

- збірна конструкція підлокітників (для полегшення роботи медичного персоналу при зміні положення підлокітників крісла і забезпечення стійкої посадки донора).
- контроль положення крісла (зміна положень крісла здійснюється за допомогою механічного регулювання з урахуванням потреб донорів).
- крісло висотою 600 мм (робоче положення крісла на рівні пояса для проведення флеботомії і просто для зручності медичного персоналу).
- підлокітники, що змінюють положення (для комфорту підлокітників розсуваються, коли донор сідає, а також можуть переміщатися вгору і вниз для найбільш зручного положення рук).
- вінілова оббивка (для оббивки крісла використовується м'який, довговічний матеріал, що добре миється, представлений в широкій кольоровій гамі).

Технічні характеристики:

Максимальне навантаження	180 кг
Максимальне навантаження на дно підлокітника	5 кг
Габаритна довжина	1700 мм
Габаритна ширина	900 мм
Габаритна висота	1250 мм
Посадкова висота	600 мм



Миття та дезінфекція

Не можна дезінфікувати крісло в дезінфекційній камері.
Не застосовувати відбілювачів, їдких і корозійних засобів.

Гарантійні зобов'язання.

Виробник гарантує високу якість продукції при дотриманні споживачем умов експлуатації.
Термін гарантії 12 місяців з моменту придбання

Комплект поставки

Крісло - 1шт
Паспорт - 1шт

